

## Instrucțiuni pentru utilizarea testelor rapide antigen efectuate din proba de salivă

1. Se respectă instrucțiunile de utilizare specifice fiecărui tip de test, conform recomandării producătorilor;
2. Se păstrează testele între +2 - +30°C;
3. Se utilizează casetele de testare imediat ce a fost scoasă din folia protectoare de aluminiu;
4. Se prelucrează mostra de salivă imediat după recoltare;
5. Se evită consumul de alimente/ băuturi cu cel puțin o oră înainte de efectuarea testului, în funcție de prevederile producătorului
6. Se asigură permanent dezinfecția corectă a mâinilor și a suprafețelor
7. Pentru testarea propriu-zisă, se procedează astfel:
  - a) Se scoate dispozitivul de testare din ambalajul de aluminiu sigilat și se folosește imediat;
  - b) Se așează dispozitivul de testare pe o suprafață plană și curată
  - c) Se scoate un tub de extracție și o sticlură de soluție. Se scoate capacul și se adaugă soluția în tubul de extracție.
  - d) Se scuipă saliva în recipientul pentru colectarea salivei;
  - e) Se extrag 4 picături de salivă cu o pipetă și se transferă în tubul de extracție
  - f) Se îndoaie și se aruncă recipientul de colectare a probei într-o pungă de plastic ca și deșeu medical
  - g) Se închide tubul de extracție cu capacul și se agită ușor, vertical, timp de aproximativ 5 secunde pentru a permite salivei să se amestece bine cu soluția
  - h) Se transferă 3 picături de probă în spațiul de probă al dispozitivului de testare (casetă)
  - i) Se citește rezultatul după 10-15 minute.

### Interpretarea rezultatelor:

- **Pozitiv:** apar două linii. O linie colorată apare în zona martor (C) și o altă linie colorată apare la zona de test (T), indiferent de intensitatea liniei de testare.
- **Negativ:** o linie colorată apare în zona-martor (C) și nu apare nicio linie în zona de test (T).
- **Neconcludent:** linia de control nu apare. Volumul specimenului insuficient sau tehnicile incorecte din punct de vedere procedural constituie motivele cele mai probabile ale rezultatelor nule. Se repetă testul utilizând o nouă casetă de testare.